

GEHWOL: Nail Repair Gel voor nagelprothese

Een nagelprothese voor een voet- of vingernagel is soms niet enkel esthetisch maar ook medisch verantwoord. Gehwol biedt u hiervoor de nieuwe Gehwol Nail repair Gel.

Voorbehandeling van de restnagel:

1) Frezen van het nageloppervlak, bijvoorbeeld met een groffe carbuurfrees.



2) Reinigen, ontvetten en drogen van het nageloppervlak, met GEHWOL Nail repair Cleaner.

3) Verwijderen van losse nagelstukjes.

4) Vrijmaken van de nagelwanden.



Nieuw: Gehwol® Nail repair Gel kan gebruikt worden voor kapotte, afbrokkende of gescheurde nagels. Het ondersteunt de heropbouw van zieke nagels. Bovendien kan het gebruikt worden voor de bevestiging van Spangen.

Voordelen:

- Visuele perfectie.
- Geen tijddruk bij het werken, omdat de gel slechts onder UV-licht uithardt.
- Flexibel nagelmateriaal, met anti-mycose werkstoffen, die beschermen tegen schimmel.

UV-hardende 1-Fase GEHWOL Nail repair Gel moet niet gemengd worden en kan direct zonder primer in een of meerdere dunne lagen aangebracht worden.

Elke laag moet met UV-licht uitharden.

Elke laag geeft na het uitharden een "dispersie laag" af. Bij het aanbrengen van meerdere lagen zorgt deze vochtige laag voor een betere hechting. De laatste dispersie laag wordt met celstofdeppers en GEHWOL Nail repair Cleaner verwijderd.

De randen van de gelnagel kunnen met een zeer kleine diamantfrees of de 6-kantige frees afgerond worden, zodat het loopcomfort optimaal blijft.

De gelnagel bevat een anti-schimmelproduct, maar ter naverzorging kan de Huid- en Nagelbeschermingsolie of -crème dagelijks aangebracht worden, als extra schimmelpreventie.



Omschrijving

GEHWOL Nail repair Gel – transparant
GEHWOL Nail repair Gel – rose
GEHWOL Nail repair Gel – opaal
GEHWOL Nail repair Cleaner
UV Lichtuithardingsapparaat
Gel modelleerpenseel
Gel modelleerpenseel

Inhoud AP

GEHWOL Nail repair Gel – transparant	5 ml	10,95
GEHWOL Nail repair Gel – rose	5 ml	10,95
GEHWOL Nail repair Gel – opaal	5 ml	10,95
GEHWOL Nail repair Cleaner	150 ml	6,75
UV Lichtuithardingsapparaat		48,50
Gel modelleerpenseel	5 mm	3,85
Gel modelleerpenseel	6 mm	3,85

 **GEHWOL®**