


1. Hoofdschakelaar
2. Aan / uit schakelaar stofafzuiging
3. Links / rechts schakelaar draairichting frais
4. Snelheids-regelknop frais(motor)
5. Regelknop afzuigkracht
6. Compartiment stofzak
7. Aansluiting afzuigslang

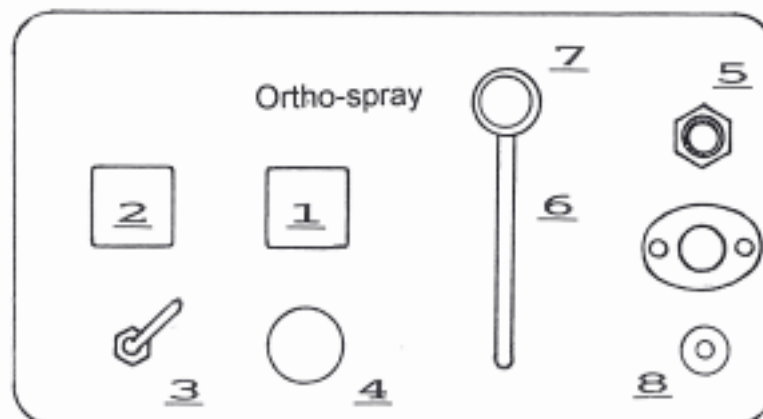

1. Hoofdschakelaar
2. Aan / uit schakelaar vloeistofpomp
3. Links / rechts schakelaar draairichting frais
4. Snelheids-regelknop frais(motor)
5. Draaiknop spray-regeling
6. Vloeistofreservoir (niveau)
7. Vul-schroef
8. Aansluiting vloeistofslang

orthofex

ORTHO-SPRAY

Beschrijving

De vernieuwde Ortho-spray van Orthofex met spray-techniek biedt als professionele pedicure-motor vele voordelen voor zowel de voetverzorger/ster als de client.

Door het gebruik van de Ortho-spray is er sprake van een hygiënische en geurloze manier van werken. (Slechts de geur van Orthofex spray-vloeistof is waarneembaar.)

De (instelbare) constante verneveling van de desinfecterende Orthofex spray-vloeistof zorgt voor een pijnloze behandeling, een aangename verkoeling en een voortdurende ontsmetting van de te behandelen plaats. Zo hechten zich de ontstane stofdeeltjes, gevormd door het fraisen met een hoog toerental, zich aan de minuscule druppeltjes (nevel), die zich tot grotere druppels verdichten en vervolgens op de plastic opvangschaal of handoek vallen. Deze manier van behandelen wordt als ontspannend en verkwikkend ervaren door de client.

Door de vulschroef (7) los te draaien kunt u met de bijgeleverde plastic flacon het vloeistofreservoir vullen met Orthofex spray-vloeistof of ge-demineraliseerd water totdat het maximale niveau op het peilglas (6) is bereikt. Het gebruik van andere vloeistoffen doet uw aanspraak op garantie vervallen. Let erop dat vulschroef (7) niet scheef wordt ingedraaid waardoor de schroefdraad in het reservoir kan beschadigen. Bij een slechte sluiting van deze schroef kan de spray-druk verminderen of wegvallen. De vulschroef (7) heeft een rubber O-ring welke zorgt voor een optimale afdichting en slechts licht aangedraaid hoeft te worden. Zorg ervoor dat het vloeistof reservoir na iedere behandeling tot maximaal gevuld is. Bij een te laag vloeistof-niveau duurt het namelijk langer voordat de spray (nevel) wordt gevormd.

De vloeistof slang en de stekker aan het handstuk worden op de volgende manier aangesloten in de unit. Als eerste neemt u de vloeistofslang en drukt deze in de aansluiting (8) net zolang totdat u merkt dat deze niet verder kan. De stekker gaat slechts op één manier in de unit; lukt dit niet, draai de stekker dan een halve slag verder. (Om de vloeistofslang uit de aansluiting te nemen gebruikt u twee handen; één om het bovenste deel van de aansluiting ingedrukt te houden, terwijl u met de andere hand de slang eruit trekt.)

Nu wordt als eerste de hoofdschakelaar (1) ingedrukt en met de regelknop (4) kan het gewenste toerental van de frais worden ingesteld.

Vervolgens wordt schakelaar (2) ingedrukt om apart de spray-pomp te starten (of te stoppen). We laten het spray-systeem even op druk komen (\pm 10 sec.). Met de draai-knop (5) kunnen we de nevel (spray) instellen al naar gelang de aard van de uit te voeren behandeling; rechtsom draaien zal een mindere spray geven en linksom zal vollere spray geven. Is de nevel (spray) bepaald dan is het niet noodzakelijk meer om deze stand weer te wijzigen zo gauw de machine uit is geweest en vervolgens weer wordt aangezet.

De frais wordt nu ingebracht volgens de beschrijving van de Pro-handstukken.

Let erop dat het frais-kop-oppervlak in aanraking komt met de nevel (spray). Door het hoge toerental moet de frais gekoeld blijven omdat anders de huid verbrandt. Met schakelaar (3) kunt u de gewenste draairichting van de frais instellen;

(L) linksom en (R) rechtsom. Let wel op dat deze schakelaar niet in de middenstand komt te staan; de frais zal niet draaien in deze stand !!

Orthofex adviseert om bij deze spray-techniek diamantboren te gebruiken daar roestvorming ontstaat bij gebruik van stalen fraisen.

Als fabrikant en service-punt adviseert Orthofex dat de Ortho-Spray 1x per jaar wordt nagekeken en schoongemaakt.

Orthofex wenst u veel succes en werkplezier met deze nieuwe techniek in een compacte uitvoering!

Orthofex b.v.
Hamburgerstraat 2-4-6-8
3512 NR Utrecht / Nederland
Tel. 030 231 35 92 // Fax 030 233 46 52

Gebruiksaanwijzing PRO - handstuk

Het inzetten en verwisselen van fraisen (zie ook onderstaande tekening)

Zorg dat de frais (motor) stil staat alvorens de frais in te brengen of te verwisselen.

De motor mag alleen draaien met vastgeklemde frais.

Door de kartelmoer rechtsom te draaien tot aan de klik gaat hij open en kunt u uw frais inbrengen als u de kartelmoer weer links om draait tot aan de klik zit uw frais vast.


Heeft u uw frais niet goed vast zitten of u heeft geen frais in uw handstuk en uw machine staat aan dan zal er een automatische zekering in werking treden.

Om deze te recette zie gebruiksaanwijzing motor.

Zowel bij de Micro-air als de Ortho-spray wordt, voordat de frais is ingebracht, één van de bijgeleverde rubberen stofkapjes over de steel van de frais geschoven.

De frais wordt hierna vastgeklemd volgens de bovenstaande beschrijving. De afstand van het rubberen kapje tot aan het handstuk is ongeveer een nageldikte. De frais draait vrij rond en het stofkapje raakt het handstuk dus niet.

Het is van groot belang dit stofkapje op de juiste manier aan te brengen omdat op deze manier wordt voorkomen dat stof en vocht in het klemmechanisme of lagers terecht komt.

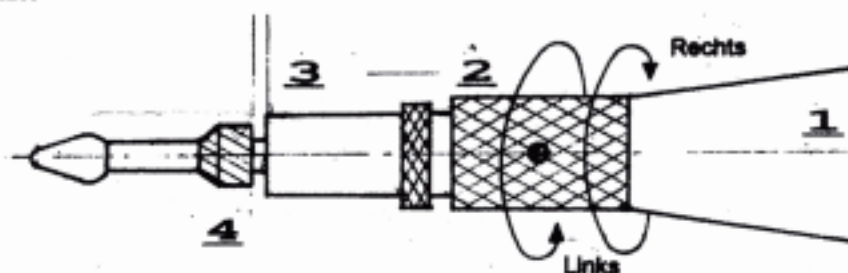

Hier onder nog enkele aandachtspunten

- * Zorg dat uw handstuk niet valt
- * Gebruik van fraisen met een diameter groter dan 8mm mogen niet worden toegepast.
- * Olie of andere smeermiddelen mogen nooit gebruikt worden.
- * Laat het reinigen van uw handstuk en/of motor aan de monteurs van Orthofex over.
- * Orthofex adviseert één keer per jaar een onderhoudsbeurt aan uw pedicure motor dit voor een langere levens duur.
- * Bij het niet naleven van deze regels kan uw recht op garantie vervallen.

U kunt wel zelf uw spraymondje of afzuigmondje schoonmaken deze kunt u van de slang aftrekken en in u ultrasonere reiniger doen (het afzuigmondje kan rechts om van de kartelmoer worden afgedraaid) . **NOOIT het hele handstuk in uw ultrasonere leggen.**